

Pour assurer que le respirateur à filtre de particules N95 fournit le niveau de protection prévu, il est important que vous l'ajustiez correctement et que vous vérifiiez son étanchéité CHAQUE FOIS que vous le portez.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez un respirateur à filtre de particules N95 FLUIDSHIELD*, le côté orange DOIT être porté à l'extérieur et vers le haut pour qu'il procure une protection contre les fluides.

Instructions pour un enfilage approprié : La première fois que vous enfilez un respirateur à filtre de particules N95 de la manière indiquée, cela pourrait vous sembler un peu difficile, mais cela deviendra de plus en plus facile à la longue. Veuillez suivre les instructions ci-contre pour enfiler le respirateur.

Conseils pour obtenir un ajustement approprié : Si vous avez de la difficulté à vérifier l'étanchéité de votre respirateur, essayez les conseils suivants :

1. Utilisez un miroir pour ajuster votre respirateur.
2. Demandez à une autre personne de vérifier si vos cheveux ou vos boucles d'oreilles sont coincés sous la bordure qui entoure le visage.
3. Assurez-vous que les serre-tête sont placés correctement. Il est tout particulièrement important de bien positionner le serre-tête supérieur sur le sommet de la tête puisqu'il est conçu de façon à garder la partie inférieure du respirateur bien ajustée sur votre menton.

REMARQUE : Si après avoir suivi ces conseils vous avez toujours de la difficulté à vérifier l'étanchéité de votre respirateur, consultez votre superviseur ou le coordonnateur du programme de protection respiratoire.

NE POURSUIVEZ PAS VOS ACTIVITÉS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS RÉUSSI À VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DE VOTRE RESPIRATEUR!!

Pour plus d'information, veuillez consulter le site : www.halyardhealth.com
Composez le 1-844-HALYARD (1-844-425-9273) aux États-Unis et au Canada.



Nos solutions axées sur les clients comprennent les outils, les ressources et le soutien dont vous avez besoin pour offrir les meilleurs soins à vos patients hospitalisés.

Formation accréditée KNOWLEDGE NETWORK*
Formation en milieu de travail et soutien technique
Représentants accrédités
Outils et pratiques exemplaires
Recherche clinique
Poursuite de l'excellence


PORT APPROPRIÉ DES RESPIRATEURS À FILTRE DE PARTICULES N95 ET DES MASQUES CHIRURGICAUX HALYARD*



1 Écarter les bords du masque de manière à l'ouvrir complètement.



2 Plier légèrement la barrette nasale pour lui donner une forme concave.

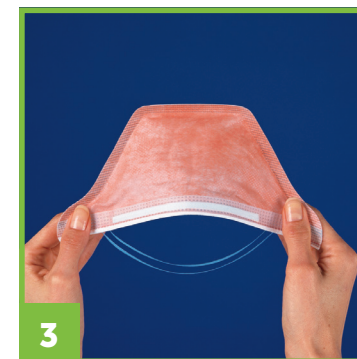

3 Retourner le masque pour mettre en évidence les deux bandes élastiques.



4 Séparer les deux bandes élastiques à l'aide de vos index et de vos pouces.



5 Placer le masque en creux sous le menton en maintenant les bandes élastiques avec les index et les pouces.



6 Remontez les serre-tête vers le dessus de votre tête.



7 Positionner l'élastique inférieur retenu par vos pouces à la base du cou.



8 Placer l'autre élastique sur le sommet de votre tête.



9 Appuyez fermement sur la barrette nasale afin que celle-ci s'ajuste à la forme de votre nez.



10 Continuer à ajuster le masque et à positionner les bords jusqu'à ce qu'ils tiennent bien au visage. Maintenant, vérifiez l'étanchéité du respirateur.

INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU RESPIRATEUR

IL EST IMPORTANT DE PROCÉDER À UNE VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU RESPIRATEUR CHAQUE FOIS QUE VOUS LE PORTEZ.

Inspirez et expirez avec force plusieurs fois. Le respirateur devrait s'affaisser légèrement lorsque vous inspirez et prendre de l'expansion lorsque vous expirez. Vous ne devriez pas sentir d'air passer entre votre visage et le respirateur.

Si le respirateur ne s'affaisse pas et ne prend pas d'expansion OU si vous sentez de l'air passer entre votre visage et le respirateur, celui-ci N'EST PAS bien ajusté. Ajustez le respirateur jusqu'à ce que vous ne sentiez plus d'air passer entre celui-ci et votre visage et que vous avez déterminé l'étanchéité du respirateur.